

## Vartojimo nurodymai

„QUIXX® daily“

**Izotoninis jūros vandens nosies purškalo / aerozolis, skirtas nosiai valyti ir drėkinti**

„QUIXX® daily“ sudėtyje nėra vaistinių medžiagų. Tai sterilus ir bekvapis purškalo nosiai drėkinti ir padėti palengvinti slogą, susijusią su sinusitu, nosies užsikimšimu, šienlige, kitomis alergijomis bei nosies priežiūrai po operacijų. Priemonėje esančios druskos koncentracija priderinta prie natūralios nosies aplinkos (0,9 %), todėl jis yra švelnus jūsus nosiai, jos nedžiovina ir nesukelia nosies gleivinės pažeidimų ar pokyčių.

„QUIXX® daily“ **sudedamosios dalys:** natūralus jūros vanduo (praskiestas išgrynintu vandeniu iki fiziologinės koncentracijos (0,9 %))

**Kaip „QUIXX® daily“ palengvina kvėpavimą**

- Skystina gleives, todėl palengvina nosyje esančių išskyrų pašalinimą, pavyzdžiui, sergant peršalimo ligomis arba alerginiais susirgimais.
- Palengvina vietinius ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (VKTI) bei ūminio ir lėtinio rinosinusito simptomus.
- Aktyviai ir kruopščiai praskalauja nosį ir sumažina bakterijų, virusų, alergenų bei žiedadulkių, kietųjų dalelių, dulkių kiekį bei perteklines gleives.
- Drėkina ir sumažina nosies dirginimą.

**Taip pat „QUIXX® daily“ būdingi tokie privalumai:**

- Priemonės sudėtyje nėra vaistinių medžiagų, jis nesukelia pripratimo ir gali būti vartojamas ilgą laiką.
- Galima laikyti horizontalioje padėtyje, nes priemonė neprateka.
- Galima vartoti iki paskutinio lašo (kol talpyklėje nieko nelieka).
- Priemonėje nėra jokių degių suslėgtų dujų, ji yra sterili ir be konservantų.

**Kas gali vartoti „QUIXX® daily“**

Vaikai nuo 2 metų amžiaus ir suaugusieji.

„QUIXX® daily“ taip pat galima vartoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu.

**Kaip vartoti „QUIXX® daily“**

„QUIXX® daily“ visada vartokite tiksliai taip, kaip aprašyta šiuose vartojimo nurodymuose. Jei abejojate, kreipkitės į gydytoją ar vaistininką.

Priemonę rekomenduojama vartoti taip:

„Quixx® daily“ vartokite iki 5 kartų per parą, kol vargina sausa ar sudirgusi nosies ertmė.

1. Jei reikia, iš nosies pašalinkite išskyras.
2. Nuo priemonės purkštuko nuimkite gaubtelį.
3. Talpyklę laikykite bet koku kampu ir švelniai įstumkite purkštuką į nosies šnervę.
4. Galvą truputį palenkite į priešingą pusę, nei šnervė, kurią ketinate išvalyti.
5. Nuspauskite ir 1–2 sekundes palaikykite nuspaudę talpyklės viršuje esantį įpurškimo mygtuką.
6. Įpurškite į vieną, o tada – į kitą nosies šnervę.
7. Kiekvieną kartą panaudoję, nuvalykite ir nusauskite purkštuką ir vėl uždėkite gaubtelį.
8. Nosį skalaujant, priemonę rekomenduojama vartoti virš kriauklės ar rezervuaro.

Laikantis higienos ir siekiant išvengti kryžminės taršos tarp vartotojų, talpyklę gali naudoti tik vienas vartotojas.



### **Kontraindikacija**

Žinomas jautrumas bet kuriai priemonės sudėtyje esančiam medžiagai.

### **Atsargiai**

Slėginė talpyklė. Kaitinama gali sprogti.

- Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
- Nepradurti ir nedeginti net panaudotos.
- Saugoti nuo saulės šviesos.
- Nelaikyti aukštesnėje kaip 50° C/122° F temperatūroje.
- Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

### **Atsargumo priemonės**

• Jei šią priemonę vartoja daugiau kaip vienas asmuo, gali išplisti infekcija. Kiekvieną kartą panaudoję purkštuką išplaukite muiliname vandenyje ir nuskalaukite karštu vandeniu.

### **Nereceptinė medicinos priemonė**

#### **Tinkamumo laikas**

36 mėnesiai.

Pirmą kartą atidarius pakuotę, priemonę reikia suvartoti per 12 mėnesių. Tirpalas lieka sterilus iki paskutinio lašo, nes naudojama speciali purškimo mygtuko technologija „maišelis ant vožtuvo“.

Nevartokite pasibaigus tinkamumo vartoti laikui.

#### **Laikymo sąlygos**

Laikyti nuo 15 °C iki 30 °C temperatūroje.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

#### **Pakuotės dydis**

100 ml

[Simbolis 5.1.1 gamintojas DIN EN ISO 15223-1:2012]

#### **Gamintojas**

AURENA LABORATORIES, AB, Fjärrviksvägen 22, SE65350 Karlstadas, Švedija  
[\[CE ženklas\]](#) 0413

#### **Platintojas**

Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, 12489 Berlynas, Vokietija

#### **Peržiūros data**

2017 m. vasario mėn.

[Simbolis 5.2.4 sterilizuota spinduliais DIN EN ISO 15223-1:2012]

[\[REF 1010-4\]](#)

[\[Versija: MMMM/MM/DD\]](#)

[\[Simbolis 5.1.5 SERIJA DIN EN ISO 15223-1:2012\]](#)

[\[Simbolis 5.1.4 smėlio stiklas DIN EN ISO 15223-1:2012\]](#)

Žr. talpyklės / dėžutės apačią

[\[Kalbos kodo simboliai kiekvienai versijai pagal ISO-639-1\]](#)